



#VITA SI...CURA

COME EFFETTUARE IL TEST SALIVARE



1.

INSERIRE L'IMBUTO
ALL'INTERNO DELLA
PROVETTA




2.

ESPETTORARE ALL'INTERNO
DELL'IMBUTO



3.

TOGLIERE L'IMBUTO

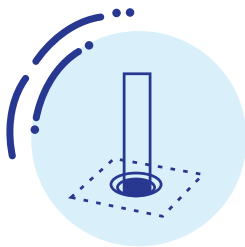

4.

POSIZIONARE LA PROVETTA
NEL PORTA PROVETTA




5.

AGGIUNGERE IL REAGENTE
MONOUSO ALL'INTERNO
DELLA PROVETTA




6.

INSERIRE IL CONTAGOCCE
ALL'INTERNO DELLA
PROVETTA

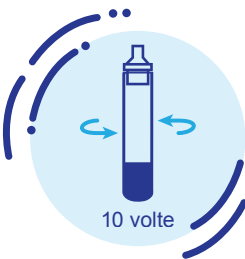


7.

AGITA LA PROVETTA
10 VOLTE

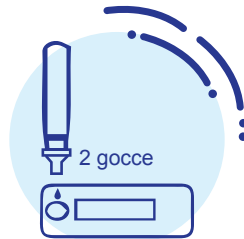

8.


APPLICA DUE GOCCE DI
SOLUZIONE SULLA
CASSETTA PER TEST

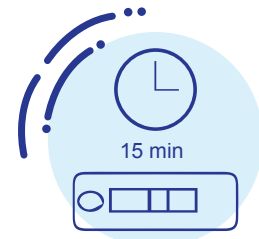


9.

ATTENDI 15 MINUTI PER
LEGGERE L'ESITO


ESITO DEL TEST AUTODIAGNOSTICO

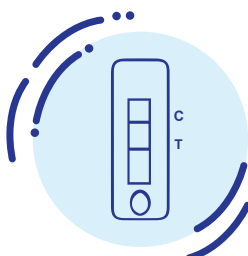

ESITO POSITIVO

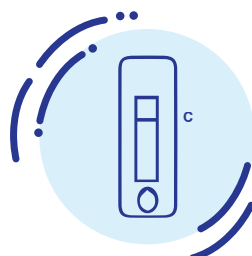

ESITO NEGATIVO

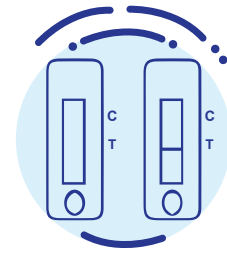

ESITO NON VALIDO