



#VITA SI...CURA

# COME EFFETTUARE IL TEST RINOFARINGEO



1.

INSERIRE DELICATAMENTE  
IL TAMPONE NELLA NARICE



2.

RUOTARE IL TAMPONE  
4-6 VOLTE NELLA NARICE  
PER 15 SECONDI



3.

RIPETERE LA PROCEDURA  
ANCHE NELL'ALTRA NARICE



4.

RIMUOVERE IL TAPPO VIOLA  
DALLA PROVETTA ED  
INSERIRE IL TAMPONE



5.

RUOTARE IL TAMPONE PREMENDO  
SULLA PUNTA OVATTATA PER  
ALMENO 3 VOLTE



6.

RIMUOVERE IL TAMPONE  
PREMENDO LA PUNTA  
SCHIACCIANDO LA PROVETTA  
DALL'ESTERNO




7.

CHIUDERE LA PROVETTA  
CON L'APPOSITO TAPPO VIOLA  
TOGLIENDO IL TAPPO TRASPARENTE



8.


APPLICARE QUATTRO  
GOCCE DI SOLUZIONE  
SULLA CASSETTA PER TEST

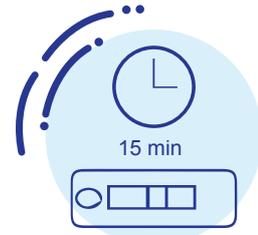


9.

ATTENDERE 15 MINUTI  
PER LEGGERE L'ESITO


## ESITO DEL TEST AUTODIAGNOSTICO

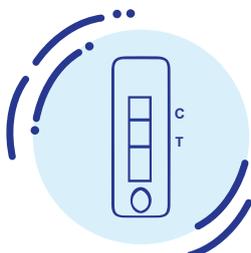

ESITO POSITIVO

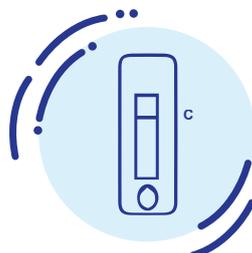

ESITO NEGATIVO

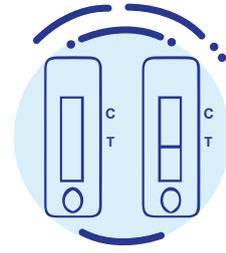

ESITO NON VALIDO